
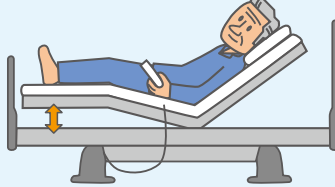
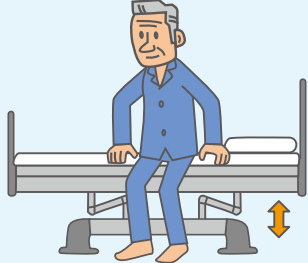


## ● 特殊寝台 (電動ベッド) の選び方

電動ベッドは、起き上がりや・離床などの動作を助け、寝たきりの生活を防止するために用います。

### 電動ベッドの特徴

|  |  |  |
|--|--|--|
| <p><b>背上げ機能</b></p> <p>モーターで床を起こし、起き上がりを動作を助けます。</p>  | <p><b>膝上げ機能</b></p> <p>背上げをするときに体がずれてしまうのを防ぎます</p>  | <p><b>高さ調節機能</b></p> <p>モーターでベッドの床高を立ち上がりやすい高さに変えて、立ち上がりの動作を助けます。</p>  <p>高さ調節ができると介護する方は楽な姿勢を取ることができるので、介護負担が軽くなります。</p> |
|--|--|--|

### 電動ベッドの種類

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| <p><b>1 モーター 電動ベッド</b></p> <p>ボタン操作で背上げができます。</p> | <p><b>2 モーター 電動ベッド</b></p> <p>ボタン操作で背上げ、高さ調節ができます。</p> | <p><b>3 モーター 電動ベッド</b></p> <p>ボタン操作で背上げ、膝上げ、高さ調節が個別にできます。<br/>背と膝が別々に操作できると、起き上がったあとに膝だけ下げることができます。ベッドへの出入りがしやすくなり寝たきり生活防止に効果的です。</p> | <p><b>らくらくモーション付 3モーター電動ベッド</b></p> <p>背と膝の上げ下げを組み合わせることで、からだのずれや圧迫感が少なく、姿勢のくずれにくい起き上がり動作を、ボタン操作ひとつで実現します。</p> |
|---|--|---|--|

|                         |              |   |   |  |               |                                     |  |  |
|-------------------------|--------------|---|---|--|---------------|-------------------------------------|--|--|
| <p><b>電動ベッドのサイズ</b></p> | <p>ベッドの幅</p> | <p><b>83cm 幅</b><br/>接近しやすく介護がしやすい。</p> | <p><b>91cm 幅</b><br/>ゆったりしたスペースと介護のしやすさを両立。</p> | <p><b>100cm 幅</b><br/>大柄の方でも充分に寝返りができるゆったりとしたスペース。</p> | <p>ベッドの長さ</p> | <p><b>ミニ</b><br/>適応身長目安は150cm未満</p> | <p><b>レギュラー</b><br/>適応身長目安は150cm以上</p> | <p><b>ロング</b><br/>適応身長目安は170cm後半から</p> |
|                         |              |   |   |  |               |                                     |  |  |

### 利用者の状態別ベッド選びのポイント

- B** 床上 (布団) からの立ち上がりも可能ですが、手すりなどの支持物が必要となります。ベッドでは、自力で寝返りをし起き上がることは可能ですが、寝返りする際に介助バーなどの支持物が必要となることがあります。
- C** 床上 (布団) からの立ち上がりは自力では不可能な方です。ベッドからは介助バーなど支持物を使用し、自力で寝返り、足を下ろし起き上がります。移乗のためにベッドの高さ調節が必要です。
- D** ベッドから起き上がるために、背上げ機能を使用し、支持物を使用して座位へ自力もしくは介護で移行する方です。臥床時の姿勢安定のため膝上げ機能、移乗や介護のためにベッドの高さ調整機能が必要です。
- E** ベッド上座位時に身体がズレないように背上げ機能、膝上げ機能が必要な方です。介護や移乗のためにベッドの高さ調整機能が必要です。

楽匠 S シリーズ パラマウントベッド

高さ調節は床からボトム面までの高さ20~65cmのロングストロークで垂直昇降します。

お使いになる方、介護する方の双方にやさしい製品です。これからの在宅介護を考えた在宅ケアベッドの進化系です。

●木製ボード



( ) はミニのサイズ

楽匠 S シリーズ特殊寝台の利用料金 (1ヶ月分)

C D E

| タイプ                     | サイズ      | レンタル料金    | 自己負担額                    | 備考 | TAIS         |
|-------------------------|----------|-----------|--------------------------|----|--------------|
| 3モーターベッド(スらくらく) KQ-9632 | レギュラー・ミニ | 10,000円/月 | 1割 1,000円/月 2割 2,000円/月  | 各種 | 00170-000513 |
| 3モーターベッド KQ-9332        | レギュラー・ミニ | 10,000円/月 | 1割 1,000円/月 2割 2,000円/月  | 各種 | 00170-000514 |
| 2モーターベッド KQ-9232        | レギュラー・ミニ | 9,000円/月  | 1割 900円/月 2割 1,800円/月    | 各種 | 00170-000515 |
|                         | ロングサイズ   | 500円/月アップ | 1割 50円/月アップ 2割 100円/月アップ | 各種 |              |

楽匠用特殊寝台付属品の利用料金 (1ヶ月分)

ベッドサイドレール(2本組)各種 KS-161Q

TAIS : 00170-000527



ベッドサイドレール(1本) KS-191Q

TAIS : 00170-000752



ベッドサイドレール(介助バー併用分1本) KS-151Q

TAIS : 00170-00395



キャスター4個セット KQ-039

TAIS : 00170-00395



サイドグリップ KS-030A

TAIS : 00170-000897



スイングアーム介助バー(1台) KS-096A

TAIS : 00170-000551



楽匠 Z シリーズ パラマウントベッド

新しい背あげ機構・ラクリアモーションを搭載。

楽匠 Z

らくしょう Z シリーズ



楽匠 Z シリーズ特殊寝台の利用料金 (1ヶ月分)

C D E

| タイプ                      | サイズ   | レンタル料金     | 自己負担額                     | 備考 | TAIS         |
|--------------------------|-------|------------|---------------------------|----|--------------|
| 3モーションベッド KQ-7332        | レギュラー | 10,500 円/月 | 1割 1,050 円/月 2割 2,100 円/月 | 各種 | 00170-000786 |
| 3モーションベッド(ハイタイプ) KQ-7333 | レギュラー | 10,500 円/月 | 1割 1,050 円/月 2割 2,100 円/月 | 各種 | 00170-000787 |
| 2モーションベッド KQ-7232        | レギュラー | 9,500 円/月  | 1割 950 円/月 2割 1,900 円/月   | 各種 | 00170-000778 |
| 2モーションベッド(ハイタイプ) KQ-7233 | レギュラー | 9,500 円/月  | 1割 950 円/月 2割 1,900 円/月   | 各種 | 00170-000779 |

POINT 1

身体がずれにくく、体圧を再分配 身体にやさしい起き上がり

背あげをするときのずり落ちを抑えて、体圧を床ずれリスクのもっとも高い仙骨部からお尻と太ももに移します。安定した姿勢で起き上がることができ、床ずれリスクにも配慮した新しい背あげの方法です。



身体がずれないように、まず膝をあげてから上体を起こしはじめます。

※ 3 モーションと 2 モーションでは、ラクリアモーションの動作が異なります。



少し上体を起こしてから、ベッドが傾き始めます。



ベッドが 10° 傾くと、さらに上体を起こします。



上体を起こしながら膝を下げることで、骨盤の立った姿勢で起き上がります。

POINT 2

姿勢が崩れにくいからリラックスできて、動きやすい

足を少し曲げて、脚を下げた背あげ姿勢になるので、骨盤が立って、安定した姿勢が維持しやすくなります。背もたれに頼ることが少なく、首や肩、腕が動きやすくなります。



※ 3 モーションと 2 モーションでは、ラクリアモーションによる背あげ姿勢が多少異なります。

POINT 3

脚が下がっているから離床しやすい

新しい背あげ姿勢は、脚を持ち上げたりしなくても、ベッドの外に脚を降ろしやすくなっています。また、ベッドの下のスペースも広いので、立ち上がるときに十分に脚を引くことができます。



楽匠 Z シリーズ  
特殊寝台付属品の  
利用料金 (1ヶ月分)



キャスター4個セット各種 KQ-P70C

TAIS : 00170-000794

■レンタル料金

500 円/月

■自己負担額

1割 50 円/月 2割 100 円/月

C D E


ベッドの高さは  
約3cm高くなります。

楽匠 プラスシリーズ パラマウントベッド

もっと、もっと一人ひとりに合わせるために。

楽匠<sup>+</sup>

らくしゅう<sup>+</sup>プラスシリーズ

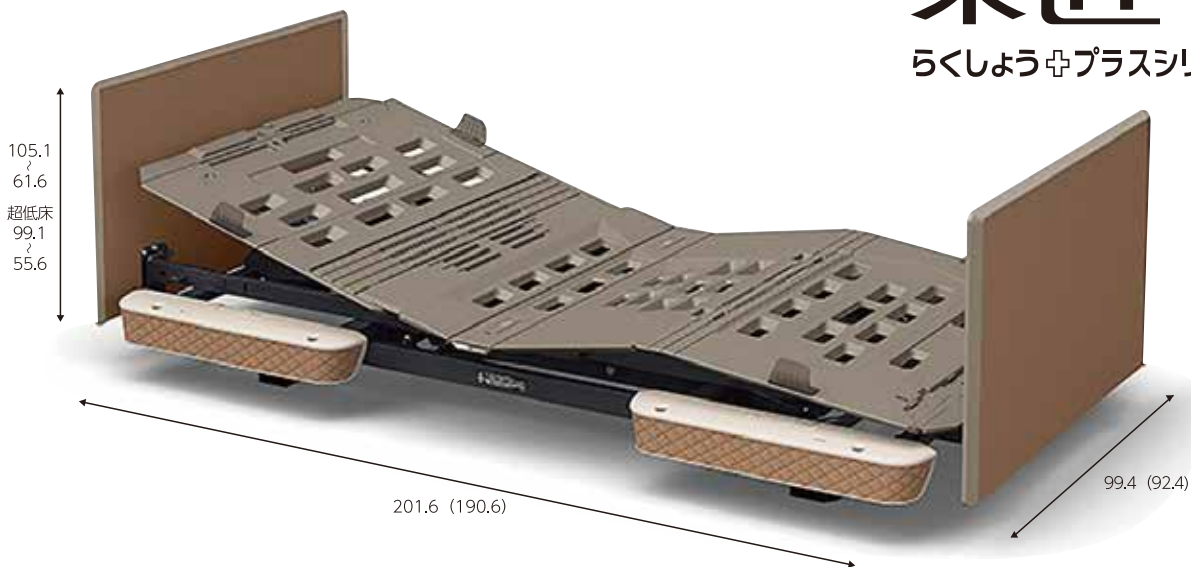

( ) はミニのサイズ

楽匠 プラスシリーズ特殊寝台の利用料金 (1ヶ月分)

C D E

| タイプ            | サイズ      | レンタル料金     | 自己負担額                     | 備考 | TAIS         |
|----------------|----------|------------|---------------------------|----|--------------|
| 3モーター KQ-A3325 | レギュラー・ミニ | 10,500 円/月 | 1割 1,050 円/月 2割 2,100 円/月 | 各種 | 00170-001410 |
| 2モーター KQ-A2325 | レギュラー・ミニ | 9,500 円/月  | 1割 950 円/月 2割 1,900 円/月   | 各種 | 00170-001401 |

スマートフォンと連動、もっと、介護する方とつながります。



ベッド操作アプリ

●手元スイッチから家庭内呼び出し

手元スイッチは無線通信でスマートフォンと接続できます。接続すると家庭内呼び出しボタンで、無線が届く範囲にあるスマートフォン\*を呼び出せます。

\*事前に専用アプリ「ベッド操作アプリ」のインストールが必要です。

※受信するには、スマートフォンの電源を入れておく必要があります。

※スマートフォンの設定やアプリの状態によっては、通知が正しく受け取れないことがあります。詳しくはアプリ内のヘルプをご覧ください。

※呼出通知の受信は、緊急時の使用を目的とした機能ではありません。



●スマートフォンによるベッド操作

スマートフォン専用アプリで、お使いの介護用ベッドを登録すると、ベッドを操作できるようになります。

操作画面はボタンの大きさなどが異なる3種類が選べます。

一人ひとりの使いやすさに配慮しています。

※使用する前にベッドの事前登録が必要です。スマートフォンはベッド1台に対して3台まで登録できます。

アプリはこちらからダウンロードできます



Android用



iOS用

特殊寝台

特殊寝台  
付属品

床ずれ  
防止用具

車椅子

車椅子  
付属品

歩行器

歩行補助杖

手すり

体位変換器

認知症老人  
徘徊感知器

スロープ

移動用リフト